

歩行車

しっかりとした安定感のある歩行車が、転倒の危険を防ぎます。

歩行車は自立歩行の手助けをする、代表的な歩行補助用具です。

自分らしい生活を送るためには、自由に移動できることはとても大切なことです。歩行に不安があり、なかなか一人で自由に移動ができない、そんな時に身体をしっかりと支えてくれる歩行車を利用すれば、安全に移動することができます。また、身体のバランスが安定することで、自然と背筋が伸びて姿勢も良くなります。ちょっとした休憩ができる座面付きのものやショッピングに最適な荷物入れのついたものなど、用途に応じていろいろな種類がありますので、身体の状態やサイズ、使用目的、生活習慣に合わせて利用者に合うものをお選びください。



歩行車の選び方

1 腕を伸ばした状態で体重をしっかりと支持できるか確認をする。

できる お好きなモデルをお選び下さい。

できない 基底面（床に接している部分を結んだ範囲）が大きく、グリップの高さのある歩行車をお選び下さい。

※グリップをつかみながら真上から力を加えたときに前輪が浮き上がってしまうものは避けましょう。

2 使用目的に応じて、屋内と屋外のどちらで使用するかを定める。

散歩や買い物などの近隣への外出時に使うのか、家の中の移動時に使うのかを決めて下さい。たとえば屋外での使用の際、周辺に坂道や段差が多ければ、屋外用でキャスターが大きい製品がおすすめです。

3 本体サイズを決める

サイズ 安心して身をまかせられる、身体のサイズに合ったものを選んで下さい。契約前に必ず試用をするようにしましょう。

重さ タクシーやバスをよく利用する方は軽いものを選びましょう。

高さ グリップを持った時に肘が軽く曲がり、身体が少し前に傾いた姿勢になるものを選びましょう。

4 欲しい機能を決める

「杖入れが必要だ」「荷物入れは大きい方がいい」「簡単に折りたためるものがいい」「デザインで選びたい」など、欲しい機能が付いているものを選びましょう。

キャスターの種類



1輪タイプ



2輪タイプ

大きなキャスターは安定性が高く、少々段差も乗り越えられます。2WAY・3WAYキャスターは小回りが利くのでとても操作しやすいのですが、自由度が高い分、バランスが不安定な方には転倒の危険性が高まりますので、身体の状態に合わせて選ぶ必要があります。

ブレーキについて



歩行車には、「走行時用」と「駐車時用」の2種類のブレーキがあります。ブレーキは安全な移動に欠かせない最も大切な部分ですが、その取付け位置や角度は製品によって違うので、実際に製品に触れ、ご自身にとってかけやすい場所にあるものを選びましょう。また、握力の弱い方でもブレーキをかけられるものや片手でフルブレーキをかけられるものもあります。

歩行車を安全に使うポイント

- ハンドルの高さを自分の身体に合わせて調節しましょう。
- 使用前に必ずブレーキの動作確認を行いましょう。
- いつもブレーキグリップに手をかけた状態で利用しましょう。
- 坂道ではブレーキをかけていても動き出す危険性があるので、椅子に座って休憩しないようにしましょう。
- 椅子に座った状態で、車いすのように使用するのは危険なのでやめましょう。

歩行車サイズ一覧

掲載	商品名・仕様	仕様	各部サイズ					
			全幅 (cm)	全長 (cm)	全高 (cm)	折りたたみ幅 (cm)	キャスター (cm)	重さ (kg)
8	カプチーノXP	屋外	57	62	75～83 (4段階 / 2cmピッチ)	31	20 (7.87in)	8
	愛乗ストリーム	屋外	50	70	69～84 (6段階 / 2.5cmピッチ)	24	18 (7.09in)	7.5
	愛乗ライフ	屋外	57	72	77～90 (7段階 / 2.5cmピッチ)	57	20 (7.87in)	7.0
9	シンフォニーSP	屋外	50	56	78.5～88 (4段階 / 3cmピッチ)	50※	約14.5 (5.71in)	5.9
	シンフォニーライト	屋外	51	62	70～76 (4段階 / 約4cmピッチ)	51※	約18.5 (7.28in)	5.4
	シンフォニーワイドSP	屋外	61	70	91～100 (4段階 / 3cmピッチ)	61※	約18.5 (7.28in)	8.6
10	ハンディウオーク S	屋外	55	65	65～77 (4段階)	23	20 (7.87in)	6.5
	ハンディウオーク M	屋外	60	65	69～98 (6段階)	23	20 (7.87in)	6.9
	ハンディウオーク L	屋外	60	65	78～100 (7段階)	23	20 (7.87in)	7.1
	ハンディウオーク アームL	屋外	60	65	98～115 (7段階)	35.5	20 (7.87in)	10.6
	アシストシルバーカー ニューDX フットストッパー付	屋外	56	63	84～99 (4段階 / 5cmピッチ)	56※	15.3 (6.02in)	5.5
	テイコブリトル	屋外	52	64	65～83 (7段階 / 3cmピッチ)	52	前輪18、後輪15 (前輪7.09、後輪5.9in)	5
	テイコブHO03	屋外	61.5	61.5	69.5～82 (6段階 / 2.5cmピッチ)	61.5	前輪19.6、後輪14.6 (前輪7.72、後輪5.75in)	6.5
	ハッピーミニ	屋外	50	57.5	70～79 (5段階 / 2.5cmピッチ)	50※	18 (7.09in)	6.5
11	ハッピーII	屋外	55.5	62	78～87 (5段階 / 2.5cmピッチ)	55.5※	19 (7.92in)	7.7
	ロレータSS	屋外	48	57	65～76 (6段階 / 2.2cmピッチ)	48	前輪17.8、後輪12.7 (前輪7、後輪5in)	6.7
	セーフティーアーム ロレータ	屋外	50	62	67～80 (7段階 / 2.2cmピッチ)	50	前輪20、後輪15 (前輪7.87、後輪5.9in)	7.7
	テイコバセオ HO001	屋外	60	69.5	83～93 (5段階 / 2cmピッチ)	60※	前輪20、後輪15.3 (前輪7.87、後輪6.02in)	6.8
	エボリューションウォーカーSX	屋外	59	73.5	75～85 (5段階 / 2.5cmピッチ)	59※	20 (7.87in)	7.8
	トレウオークスリム	屋内	55	59	85～105 (無段階)	-	前輪15.24、後輪10 (前輪6、後輪3.93in)	12.1
12	レッツゴー	屋内	54	60	84～91.5 (4段階 / 2.5cmピッチ)	54※	15 (5.9in)	7
	歩行補助車ラビット WA-2	屋外	51	63	76～96 (7段階 / 3.5cmピッチ)	51※	18 (7.09in)	9.8
	歩行補助車ラビット WA-5	屋外	54	60	76～103 (9段階 / 3.5cmピッチ)	54※	18 (7.09in)	10
	ピウプレスト75	屋外	62	64	80～95 (6段階 / 3cmピッチ)	32	18 (7.09in)	7
	ヘルシーワン T-R 298N	屋外	48	55	78～90 (5段階 / 3cmピッチ)	24	13.5 (5.31in)	4.3
	NOPPO (ノッポ)	屋外	65	85.5	74.5～89.5 (7段階 / 2.5cmピッチ)	65	前輪15.24、後輪30.48 (前輪6、後輪12in)	12
	アルク	屋外	63	71	82～94 (6段階 / 2cmピッチ)	63	前輪15.24、後輪35.56 (前輪6、後輪14in)	11.8
	シェールマンII	屋外	55	64	88～104 (5段階 / 3cmピッチ)	55	18 (7.09in)	10
	パティオII Mタイプ・Lタイプ	屋外	62	70	M:69.5～79.5 L:75～85cm (4段階 / 2.5cmピッチ)	30	前輪18.5、後輪30 (前輪8、後輪12in)	M:9.4 L:9.5

※の付いているものは、幅ではなく奥行のサイズが変わります。



歩行を安定させるコンパクトな歩行車。
自立可能なセンター折りたたみ構造を採用。
コンパクトで持ち運びに便利。



重量
8.0kg

フォーライフメディカル

カプチーノXP

使用時 全幅57×全長62×全高75～83cm (4段階/2cmピッチ)

折りたたみ時 全幅31×全長62×全高75～83cm (4段階)

前輪20cm、後輪20cm

耐荷重100kg

月額レンタル料金 3,000円

ご利用者負担額

300円



コンパクトでも
安定性抜群。

重量
7.5kg

AIJ

愛乗ストリーム

使用時 全幅50×全長70×全高69～84cm (6段階/2.5cmピッチ)

折りたたみ時 全幅24×全長70×全高69～84cm (6段階)

前輪18cm、後輪18cm

重量耐荷重100kg

月額レンタル料金 2,500円

ご利用者負担額

250円



直径20cmの大型車輪で
段差や溝にとっても強い。

重量
7.0kg

AIJ

愛乗ライフ

使用時 全幅57×全長72×全高77～90cm (7段階/2.5cmピッチ)

折りたたみ時 全幅57×全長72×全高77～90cm (7段階)

前輪20cm、後輪20cm

耐荷重100kg

月額レンタル料金 2,500円

ご利用者負担額

250円

親しみのある
シルバーカーの
使い易さとデザインで
ご使用の抵抗感を軽減。

重量
5.9kg

島製作所

シンフォニー SP

使用時 全幅50×全長56×全高78.5～88cm (4段階/3cmピッチ)

折りたたみ時 全幅50×全長28.5×全高86.5cm

前輪約14.5cm、後輪約14.5cm 耐荷重100kg



月額レンタル料金 3,000円

ご利用者負担額

300円

小柄な方に便利な小型歩行車。
左右どちらでも両輪ブレーキ&2WAYブレーキ。



重量
約5.4kg

島製作所

シンフォニーライト使用時 全幅51×全長62×全高70～76cm
(4段階/約4cmピッチ)

折りたたみ時 全幅51×全長38×全高63cm

前輪約18.5cm、後輪約18.5cm 耐荷重75kg

月額レンタル料金 3,000円

ご利用者負担額

300円

すべてがワイドな安心ゆったり設計。
アルミフレーム&大型タイヤ仕様。



重量
約8.6kg

島製作所

シンフォニーワイドSP使用時 全幅61×全長70×全高91～100cm
(4段階/3cmピッチ)

折りたたみ時 全幅61×全長42×全高99cm

前輪約18.5cm、後輪約18.5cm 耐荷重80kg

月額レンタル料金 3,500円

ご利用者負担額

350円

軽い、使いやすい。
そしてスタイリッシュ。
利便性・安全性・操作性に
配慮した歩行車です。

S	M	L
重量 6.5kg	重量 6.9kg	重量 7.1kg

パラマウントベッド

ハンディウォーク S・M・L PMC

S	使用時	全幅55×全長65×全高65～77cm (4段階)
	折りたたみ時	全幅23×全長60×全高65～77cm
	前輪20cm、後輪20cm	耐荷重125kg
M	使用時	全幅60×全長65×全高69～88cm (6段階)
	折りたたみ時	全幅23×全長65×全高69～88cm
	前輪20cm、後輪20cm	耐荷重130kg
L	使用時	全幅60×全長65×全高78～100cm (7段階)
	折りたたみ時	全幅23×全長65×全高78～100cm
	前輪20cm、後輪20cm	耐荷重150kg

月額レンタル料金 4,000円

ご利用者負担額
400円

軽い、使いやすい。
そしてスタイリッシュ。
利便性・安全性・操作性に
配慮した歩行車です。

重量
10.6kg

パラマウントベッド

ハンディウォーク アームL PMC

アームL アームサポート付 モデル	使用時	全幅60×全長65×全高98～115cm (7段階)
	折りたたみ時	全幅35.5×全長65×全高98～115cm
	※ハンドル奥行調節最大時約66cm	
	前輪20cm、後輪20cm	耐荷重150kg

月額レンタル料金 5,000円

ご利用者負担額
500円

体重移動時も倒れない
安全設計。

重量
5.5kg

五十畑工業

アシストシルバーカー ニュー DX
フットストッパー付

使用時	全幅56×全長63×全高84～99cm (4段階／5cmピッチ)
折りたたみ時	全幅56×全長63×全高91cm
前輪15.3cm、後輪15.3cm	耐荷重70kg

H007

月額レンタル料金 4,000円

ご利用者負担額
400円

軽量5kgの
コンパクトな歩行車。

重量
5.0kg

幸和製作所

テイコブリトル CSF

使用時	全幅52×奥行64×高さ65～83cm (7段階／3cmピッチ)
折りたたみ時	全幅52×全長40×全高73cm
前輪18cm、後輪15cm	耐荷重75kg

月額レンタル料金 3,000円

ご利用者負担額
300円

こんなに小さくても
しっかり支えます。

重量
6.5kg

幸和製作所

テイコブH003

使用時	全幅61.5×全長61.5×全高69.5～82cm (6段階／2.5cmピッチ)
折りたたみ時	全幅61.5×全長41×全高79cm
前輪19.6cm、後輪14.6cm	耐荷重75kg

月額レンタル料金 3,000円

ご利用者負担額
300円

安全性と信頼性に
定評のあるハッピー IIが
さらに軽量・コンパクトに
なりました。

重量
6.5kg

竹虎 (ヒューマンケア)

ハッピーミニ CSF

使用時	全幅50×全長57.5×全高70～79cm (5段階／2.5cmピッチ)
折りたたみ時	全幅50×全長39.5×全高85～93cm (5段階)
前輪18cm、後輪18cm	耐荷重80kg

月額レンタル料金 3,000円

ご利用者負担額
300円

シンプルで安全性に
優れた歩行車。



重量
7.7kg

竹虎 (ヒューマンケア)
ハッピーⅡ

使用時 全幅55.5×全長62×全高78~87cm
(5段階/2.5cmピッチ)
折りたたみ時 全幅55.5×全長43.5×全高93~102cm (5段階)
前輪19cm、後輪19cm 耐荷重100kg

月額レンタル料金 3,000円
ご利用者負担額
300円

さらにコンパクトになって、
より小回りがききます。



重量
6.7kg

イーストアイ
ロレータSS

使用時 全幅48×全長57×全高65~76cm (6段階/2.2cmピッチ)
折りたたみ時 全幅48×全長30×全高80cm
前輪17.78cm、後輪12.7cm 耐荷重100kg

月額レンタル料金 3,000円
ご利用者負担額
300円

簡単操作の
パーキングブレーキ機能付き。
便利なトレーが標準装備。



重量
7.7kg

イーストアイ
セーフティーアーム ロレータ

使用時 全幅50×全長62×全高67~80cm (7段階/2.2cmピッチ)
折りたたみ時 全幅50×全長49×全高81cm
前輪20cm、後輪15cm 耐荷重100kg

RSA-R
月額レンタル料金 3,000円
ご利用者負担額
300円

広々座面！
折りたたみ簡単！
手元ブレーキ&
ストッパー装備。



重量
6.8kg

幸和製作所
テイコブパセオ H0001

使用時 全幅60×全長69.5×全高83~93cm (5段階/2cmピッチ)
折りたたみ時 全幅60×全長44.5×全高96cm
前輪20cm、後輪15.3cm 耐荷重75kg

月額レンタル料金 3,000円
ご利用者負担額
300円

お客様のご意見を
“かたち”にした、
充実した装備と機能を
兼ね備えた歩行車。



重量
7.8kg

竹虎 (ヒューマンケア)
エボリュションウォーカー SX

使用時 全幅59×全長73.5(バスケット含む)×
全高75~85cm (5段階/2.5cmピッチ)
折りたたみ時 全幅59×全長49(バスケット含む)×全高90~99cm (5段階)
前輪20cm、後輪20cm 耐荷重100kg

月額レンタル料金 4,000円
ご利用者負担額
400円

高さ調整が
ワンタッチレバー式で
手間いらず。
ストッパーハンドル付きの、
手軽に扱える歩行車です。



重量
12.1kg

日進医療器
トレウォークスリム

使用時 全幅55×奥行59×高さ85~105cm (無段階)
前輪15.24cm、後輪10cm 耐荷重75kg(馬蹄の部分)

月額レンタル料金 4,000円
ご利用者負担額
400円

歩行器

手すり

車いす

スロープ

特殊寝台

床ずれ予防

体位変換器

リフト

徘徊センサー

自動排泄
処理装置

介護保険
対象外

重量
7.0kg竹虎 (ヒューマンケア)
レッツゴー

使用時 全幅54×全長60×全高84～91.5cm (4段階 / 2.5cmピッチ)
 折りたたみ時 全幅54×全長22×全高90～99cm (4段階)
 前輪15cm、後輪15cm 耐荷重80kg

月額レンタル料金 3,000円
**ご利用者負担額
 300円**

洗練されたデザインの
室内専用歩行車。

足腰が弱い方の
歩行の負担軽減と、
歩行訓練に最適。

WA-2 重量 9.8kg
 WA-5 重量 10.0kg

ウェルパートナーズ
歩行補助車ラビット
WA-2・WA-5

使用時 全幅51×全長63×全高76～96cm
 (7段階 / 3.5cmピッチ)
 折りたたみ時 全幅51×全長47×全高95cm
 前輪18cm、後輪18cm 耐荷重100kg

使用時 全幅54×全長60×全高76～103cm
 (9段階 / 3.5cmピッチ)
 折りたたみ時 全幅54×全長47×全高95cm
 前輪18cm、後輪18cm 耐荷重100kg

月額レンタル料金 4,000円
**ご利用者負担額
 400円**



大車輪でしっかり安定、
シートの座り心地も快適。

重量
7.0kg象印ペビー
ピュブレスト75 TM

使用時 全幅62×全長64×全高80～95cm (6段階 / 3cmピッチ)
 折りたたみ時 全幅32×全長64×全高80cm
 前輪18cm、後輪18cm 耐荷重75kg

月額レンタル料金 4,000円
**ご利用者負担額
 400円**



基本機能は備えながら
スリムで動きやすさ抜群。

重量
4.3kg象印ペビー
ヘルシーワン T-R 298N

使用時 全幅48×全長55×全高78～90cm (5段階 / 3cmピッチ)
 折りたたみ時 全幅24×全長27×全高82cm
 前輪13.5cm、後輪13.5cm 耐荷重75kg

月額レンタル料金 3,000円
**ご利用者負担額
 300円**



歩行車・介助車・自操車を
一つに集約しました。

重量
12.0kgカナヤママシンリー
NOPPO (ノッポ) TM

使用時 全幅65×全長85.5×全高74.5～89.5cm
 (7段階 / 2.5cmピッチ)
 折りたたみ時 全幅65×全長54.5×全高86cm
 前輪15.24cm、後輪30.48cm 耐荷重100kg

月額レンタル料金 4,000円
**ご利用者負担額
 400円**

日進医療器
アルク TM

月額レンタル料金 4,000円
**ご利用者負担額
 400円**

睦三
シェールマンII

月額レンタル料金 3,000円
**ご利用者負担額
 300円**

テスココーポレーション
パティオII
Mタイプ・Lタイプ

月額レンタル料金 3,000円
**ご利用者負担額
 300円**



歩行器

歩行のリハビリ訓練を 屋内で行うための必需品。

歩行器は、フレーム構造でできた四脚の歩行補助用具です。

杖では不安だけれど車いすに乗らなければならないほどでもない、という方に適しています。

固定式



固定式歩行器は、歩行器の基本タイプです。本体を持ち上げて移動するタイプなので、キャスター付きのものと違って多少の段差も問題ありません。腕の筋肉や立位保持のリハビリ訓練にも利用できます。

歩行法

歩行を始める際は、患側の足から歩を進めることが基本です。

- 1 歩行器を両手で持ち上げて1歩前に置く。
- 2 歩行器のグリップを握って腕で上体を支えながら患側の足を前に出す。
- 3 次に健側の足を出す。

上記を繰り返して歩行します。

交互式



交互式の歩行器は、左右のフレームを交互に動かすことで歩行する歩行器です。左右どちらかの足が地面に接しているので、固定式ほど腕の力を必要としません。固定式よりも操作が難しく、訓練が必要です。

歩行法

フレームを左右別々に交互で動かして移動を続けます。

- 1 右側のフレームを前に出す。
- 2 左足を前に出す。
- 3 左側のフレームを前に出す。
- 4 右足を前に出す。

上記を繰り返して歩行します。

キャスター付



前脚もしくは四輪すべてにキャスターをつけた歩行器です。歩行器を持ち上げることなく、キャスターを滑らせることで前に進めることができますので、上肢の筋力が弱く歩行器を持ち上げられない方に適しています。

歩行法

キャスターを利用して進みます。フレームを持ち上げる必要がないのが特徴です。

- 1 後脚を軽く上げ、前輪のキャスターを使って歩行器を1歩前に動かす。
 - 2 歩行器のグリップに体重をかけるとストッパーがかかります。
 - 3 歩行器のグリップを握って腕で上体を支えながら患側の足を前に出す。
 - 4 次に健側の足を出す。
- 上記を繰り返して歩行します。

歩行器サイズ一覧

掲載	商品名・仕様	仕様	各部サイズ			
			幅 (cm)	奥行 (cm)	高さ (cm)	重さ (kg)
14	カーボンウォーカー Mサイズ	屋内	49	43	68.5～81 (6段階／2.5cmピッチ)	1.28
	セーフティアームウォーカー SAWR	屋内	57	45	66.5～76.5 (5段階／2.5cmピッチ)	2.8
	セーフティアームウォーカー ミニSAWSR	屋内	54	43	59～69 (5段階／2.5cmピッチ)	2.7
	セーフティアームウォーカー Gタイプ	屋内	68	59	79.5～89.5 (5段階／2.5cmピッチ)	4.8
	セーフティアームウォーカー Gタイプミニ	屋内	65.5	57	72～82 (5段階／2.5cmピッチ)	4.5
15	スリムフレームウォーカー	屋内	49	45	68.5～81cm (6段階／2.5cmピッチ)	2.55
	セーフティアーム Vタイプウォーカー	屋内	63.5	55	75～85 (5段階／2.5cmピッチ)	4.9
	ミニフレームウォーカー	屋内	42	35	62.5～75 (6段階／2.5cmピッチ)	2.4
	アルコールIG-T型	屋内	51.5	57	87.5～107.5cm (6段階／4cmピッチ)	13.6
	軽量ピラミッド型ウォーカー W-2010	屋内	62	53	73～83cm (5段階／2.5cmピッチ)	1.85
	交互型ウォーカー W3010	屋内	53.5	47	74～84cm (5段階／2.5cmピッチ)	2.7
	標準型ウォーカー W8010	屋内	62	48	70～80cm (5段階／2.5cmピッチ)	2.7

歩行器

手すり

車いす

スロープ

特殊寝台

床ずれ予防

体位変換器

リフト

徘徊センサー

自動排泄処理装置

介護保険対象外

カーボンファイバー製
超軽量歩行器が登場。

高剛性&超軽量を実現した
カーボンファイバー (CFRP) 製
歩行器です。

持ち上げる力が弱い方にも無理なくお使いいただける超軽量の固定型歩行器です。段差乗り越え時や腕力低下時の転倒リスクを軽減し、安定した歩行訓練が可能です。

重量
1.28kg

シンエンス

カーボンウォーカー Mサイズ

全幅49×奥行43×高さ68.5～81cm (6段階／2.5cmピッチ)
耐荷重100kg



月額レンタル料金 4,000円

ご利用者負担額

400円

歩行を安定させるコンパクトな歩行器。



セーフティアームウォーカー SAWR・ミニSAWSR

SAWR	全幅57×奥行45×高さ66.5～76.5cm (5段階／2.5cmピッチ) 耐荷重100kg
ミニSAWSR	全幅54×奥行43×高さ59～69cm (5段階／2.5cmピッチ) 耐荷重100kg

月額レンタル料金 3,000円

ご利用者負担額

300円

屋外での使用でもおすすめの、がっちりした足回り。



セーフティアームウォーカー Gタイプ・Gタイプミニ

Gタイプ	全幅68×奥行59×高さ79.5～89.5cm (5段階／2.5cmピッチ) 耐荷重100kg
Gタイプミニ	全幅65.5×奥行57×高さ72～82cm (5段階／2.5cmピッチ) 耐荷重100kg

Gタイプ
[SAWGR]、
Gタイプミニ
[SAWGR]

月額レンタル料金 3,000円

ご利用者負担額

300円

日本人の体格、廊下の幅に合わせて、従来モデルより幅を約10cm狭くしました。

シンエンス
**スリムフレーム
ウォーカー**

重量
2.55kg

全幅49×奥行45×高さ68.5～81cm
(6段階 / 2.5cmピッチ)

耐荷重100kg

月額レンタル料金 3,000円

ご利用者負担額

300円

■ オプションパーツ



SW3G

月額レンタル料金 0円

ご利用者負担額

0円



WE3G

月額レンタル料金 0円

ご利用者負担額

0円



※オプションパーツは、キャスターのみです。
※本体は付属しません。

全幅42cmのコンパクトサイズ。
今までにないミニサイズ歩行器。

シンエンス
**ミニフレーム
ウォーカー**

重量
2.4kg

全幅42×奥行35×高さ62.5～75cm
(6段階 / 2.5cmピッチ)

耐荷重100kg

月額レンタル料金 3,000円

ご利用者負担額

300円

■ オプションパーツ



SW3G

月額レンタル料金 0円

ご利用者負担額

0円



WE3G

月額レンタル料金 0円

ご利用者負担額

0円



※オプションパーツは、キャスターのみです。
※本体は付属しません。

折りたたみのできる
軽量歩行器。

重量
1.85kg

星医療器
**軽量ピラミッド型
ウォーカー W-2010**

全幅62×奥行53×高さ73～83cm (5段階 / 2.5cmピッチ)

耐荷重100kg



月額レンタル料金 2,500円

ご利用者負担額

250円

屋外での使用に
特におすすめ。
4輪大型ゴムタイヤが
スムーズな歩行を
サポート!

重量
4.9kg

イーストアイ

**セーフティアーム
Vタイプウォーカー**

全幅63.5×奥行55×高さ75～85cm (5段階 / 2.5cmピッチ)

耐荷重100kg



月額レンタル料金 3,500円

ご利用者負担額

350円

操作性に優れた
コンパクトタイプの
歩行器。

重量
13.6kg

星光医療器製作所

アルコー 1G-T型

全幅51.5×奥行57×高さ87.5～107.5cm (6段階 / 4cmピッチ)

耐荷重80kg



月額レンタル料金 3,500円

ご利用者負担額

350円

重量
2.7kg

星医療器

**交互型ウォーカー
W3010**

幅53.5×奥行47×高さ74～84cm
(5段階 / 2.5cmピッチ)

耐荷重100kg



月額レンタル料金 3,000円

ご利用者負担額

300円

重量
2.7kg

星医療器

**標準型ウォーカー
W8010**

幅62×奥行48×高さ70～80cm
(5段階 / 2.5cmピッチ)

耐荷重100kg



月額レンタル料金 3,000円

ご利用者負担額

300円

歩行器

手すり

車いす

スロープ

特殊寝台

床ずれ予防

体位変換器

リフト

徘徊センサー

自動排泄
処理装置

介護保険
対象外

杖

不安を感じる歩行時に
しっかりと身体を支える歩行杖。

あらゆるニーズに適用する
独・オッセンベルグ社の
新ロフストランドクラッチ。



レッド

ネイビー

O型・グリップ右手用 (写真左)
U型・グリップ左手用 (写真右)



ケイホスピア
**オッセンベルグ
オールニーズクラッチ**

グリップ高さ22~27cm (上部)、71~101cm (下部)
※ 適応身長136~196cm
重量810g (O型)、780g (U型)

月額レンタル料金 1,500円

ご利用者負担額
150円

ふれ止めナットで
歩行時のガタつきを
防ぎます。



日進医療器
**ロフストランド
クラッチ
TY130**

高さ85.5~118cm
重量640g

月額レンタル料金 1,000円

ご利用者負担額
100円


長さ調節ができる
アルミ製脇下支持クラッチ。

星医療器
松葉杖 2本組

S	全長96.5~117cm
	グリップ~杖先: 56~92.5cm (10段階)
	M-1021 脇あて~グリップ: 20~40cm (5段階)
重量1.6kg	
M	全長114~134.5cm
	グリップ~杖先: 56~97cm (10段階)
	M-1022 脇あて~グリップ: 37.5~53.5cm (5段階)
重量1.7kg	
L	全長124~144cm
	グリップ~杖先: 71~107.5cm (10段階)
	M-1023 脇あて~グリップ: 37.5~53.5cm (5段階)
重量1.8kg	

月額レンタル料金 1,000円

ご利用者負担額
100円

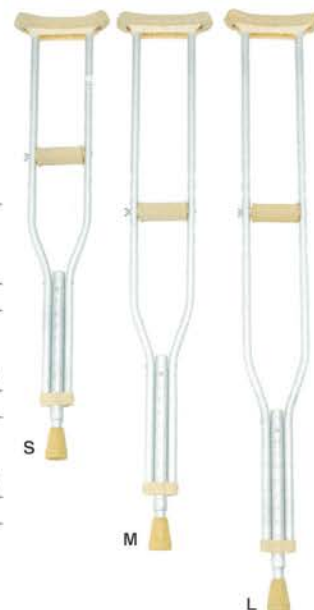

超軽量400g、オールカーボン使用。



カーボン柄 NB

花柄 BR

格子柄 NB



島製作所

オールカーボンクオッドケイン 四点式

高さ60.5～86cm、設置面：幅14×奥行18.5cm

重量約400g

月額レンタル料金 1,500円

ご利用者負担額

150円

細型ネックタイプグリップを採用した、カーボン製の可動式四点杖。



グレー

かすみ草

島製作所

カーボン四点可動式 スモールタイプ

高さ62.5～88cm (11段階)、設置面：幅10×奥行10cm

重量約440g

月額レンタル料金 1,500円

ご利用者負担額

150円

軽くておしゃれな
カーボン製の四点杖。



オールカーボン仕様

島製作所

オールカーボン 四点式 ミドルタイプ

月額レンタル料金 1,500円

ご利用者負担額

150円

高さ62.5～88cm (11段階)
設置面：幅16.5×奥行22.5cm

重量約450g



かすみ草

グレー

左右兼用タイプの
四点杖。



C-7012

C-7011

星医療酸器 四点杖

C-7011

高さ67～89cm (10段階)、設置面15×21.5cm

重量820g

C-7012

高さ67～89cm (10段階)、設置面19.5×31cm

重量1kg

月額レンタル料金 1,000円

ご利用者負担額

100円